



Cardiospy visszaállítása hibásan vírusként észlelés után


1. lépés: Nyissa meg a Windows Biztonság Vírusok és veszélyforrások elleni védelem menüjét.

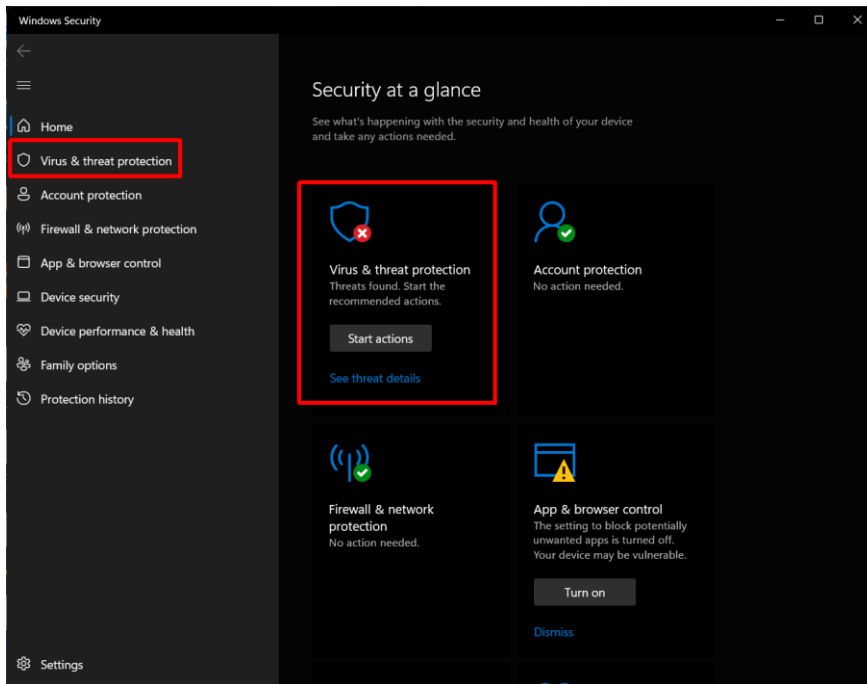


2. lépés: Vírusok és veszélyforrások elleni védelem almenüben válassza a beállítások kezelése menüt.

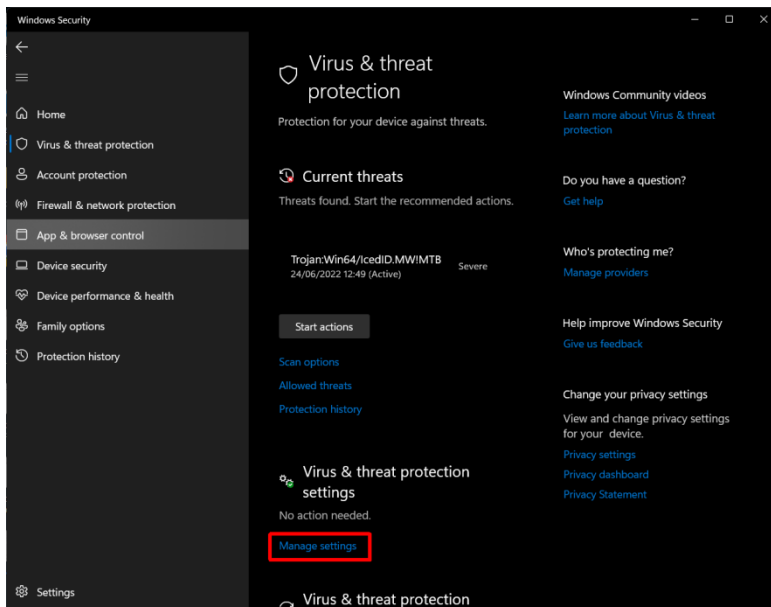


3. lépés: Görgessen le és válassza a Kivételek hozzáadása vagy eltávolítása menüt.

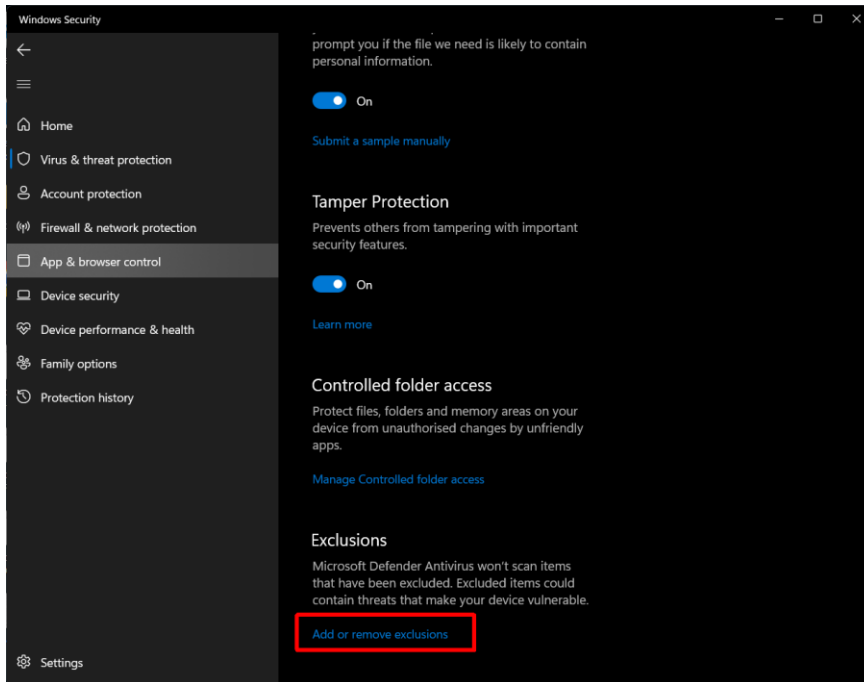

4. lépés: Adja hozzá a C:\Program Files\Labtech\Cardiospy mappát kivételként.

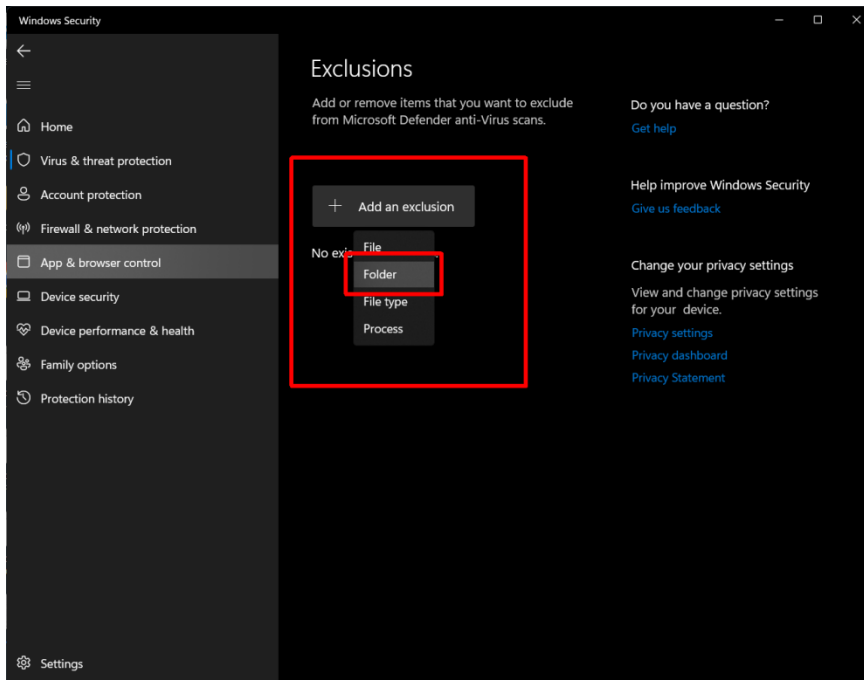

5. lépés: Lépjen vissza a Vírusok és veszélyforrások elleni védelem beállításokhoz és válassza a Védelmi előzmények lehetőséget.

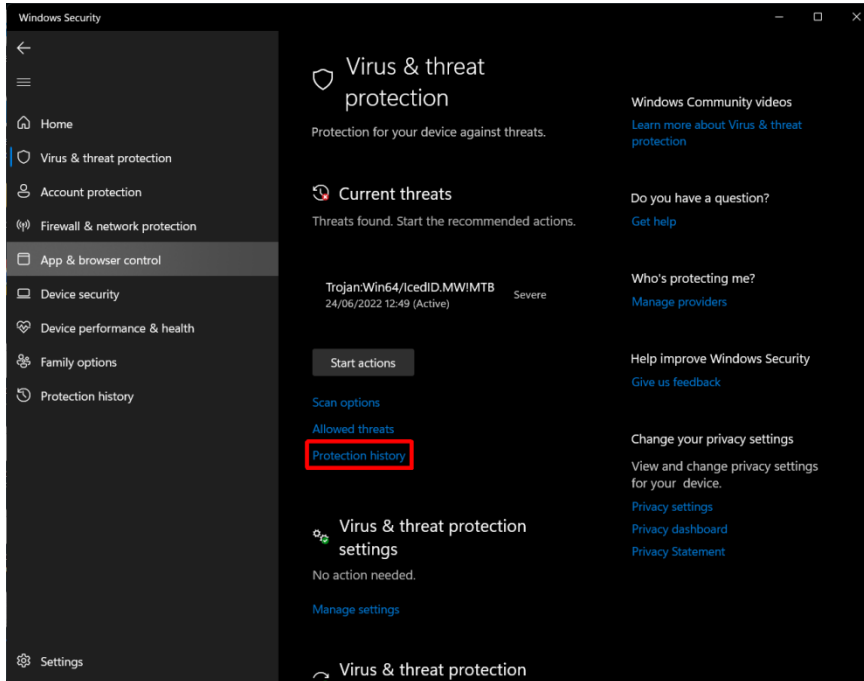

6. lépés: Válassza ki a karanténba helyezett fenyegetést, és nyomja meg a visszaállítás gombot.

